

behear.smarto

מגבר שמיעה




מודל: ABH-410

מדריך מקוצר למשתמש

BeHear SMARTO מגבר שמיעה אישי, פשוט אך עוצמתי,
בעל חיבור בלוטות' שיעזור לך לשמוע את העולם

1. מה כלול באריזה?

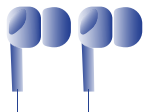

אוזניות
"בתוך האוזן"



אוזניות
"מעל לאוזן"




עריסת הטענה



גוף המגבר



רצועה
(לתלייה על הצוואר)


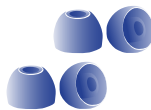


מתאמי סיליקון
בגדלים שונים



כבל הטענה

2. ביחרו וחברו אוזנייה

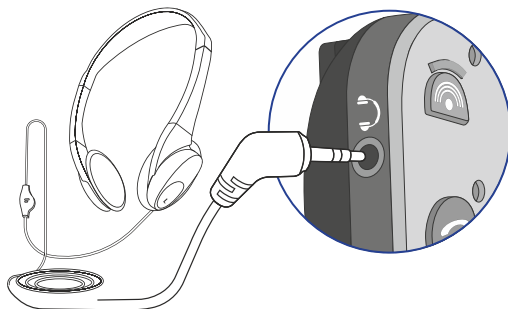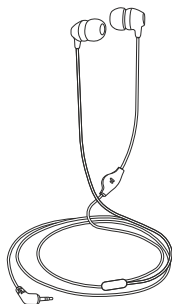

3. הרכיבו את האוזנייה



שימו לב לסימון
L לאוזן שמאל
ו-R לאוזן ימין

4. אבטחו את המגבר

עם הרצועה



עם התפס



הפעלה / כיבוי

הפעלת המגבר:

יש להזיז את כפתור ההפעלה כלפי מעלה ולהחזיק אותו עד שהמגבר רוטט ונורת הLED מהבהבת באור ירוק




כיבוי המגבר:

יש להזיז את כפתור ההפעלה כלפי מעלה ולהחזיק אותו עד שהמגבר רוטט ונורת הLED מהבהבת באור אדום




עוצמת קול* ◀

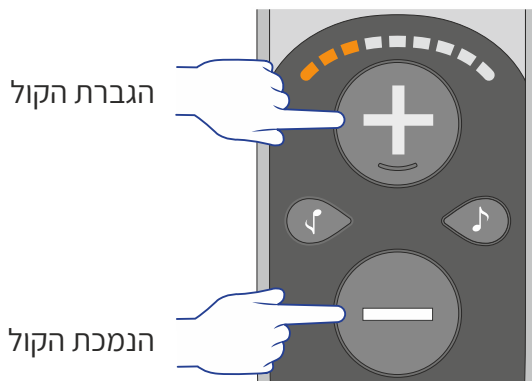


* למכשיר 3 רמות של עוצמת קול, ראו עמוד 8 לפרטים נוספים.

בס / טרבל ◀

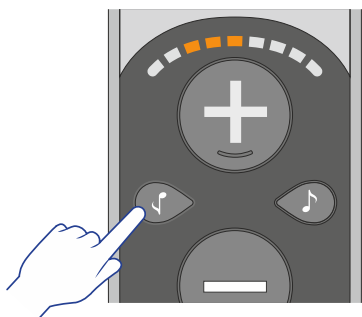


הגבירו בסיס
(תדרים נמוכים) 🎵


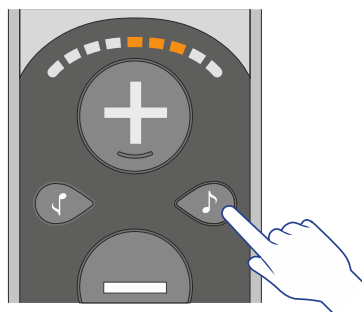


הגבירו טרבל
(תדרים גבוהים) 🎵

מיקוד קול

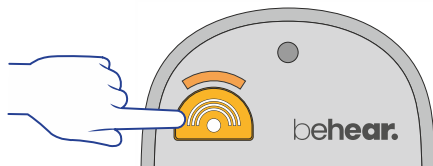


עברו בין מצב "היקפי"
למצב "קדמי"

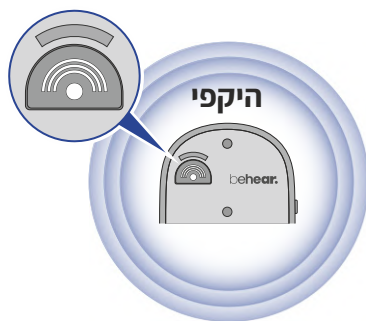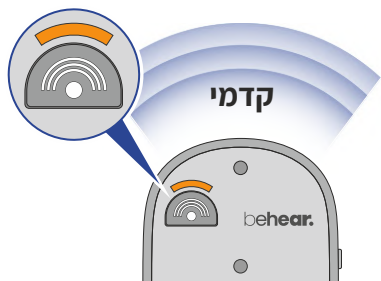


במצב "קדמי",
כוונו את המגבר
כלפי הכיוון שבו
תרצו להתמקד.

איזון בין אוזן ימין לשמאל

לחצו והחזיקו בו זמנית, במשך חמש שניות את
כפתורי ו-י עד שסרגל הווליום מהבהב.

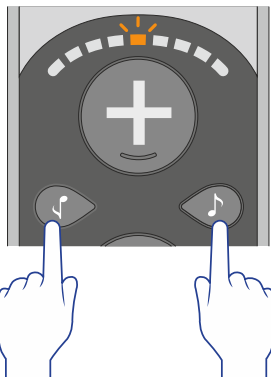


בזמן שסרגל הווליום מהבהב:

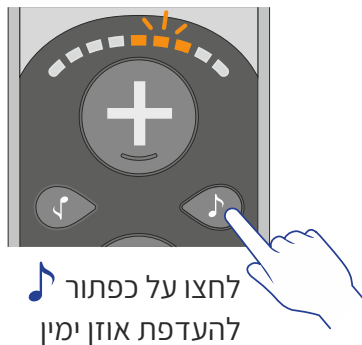

עוצמת קול מירבית

ליחצו והחזיקו בו זמנית,
במשך חמש שניות, את כפתורי
+ ו- כדי לעבור בין רמות
הווליום השונות.

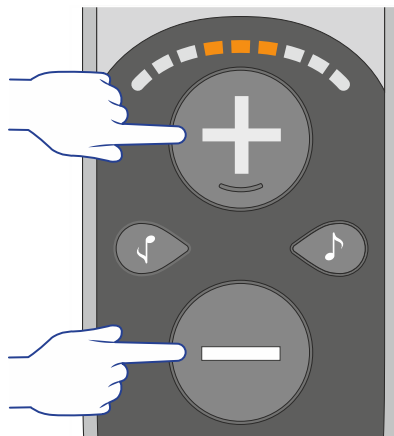

גבוהה*



בינונית




נמוכה



* אם עוצמת הקול אינה מספקת, ביצעו את הערכת השמיעה באפליקציה על מנת לאפשר הגבר חזק יותר. ראו עמוד 15.

זהירות: האזנה בעוצמת הווליום המירבית למשך פרקי זמן ארוכים עלולה לפגוע בשמיעה.

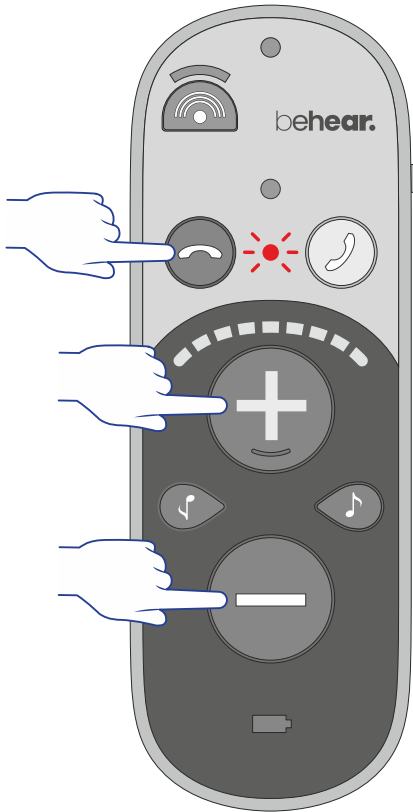


על מנת למנוע שינוי לא רצוי ניתן לנעול את כל הכפתורים במגבר על ידי לחיצה והחזקה בו זמנית של שלושת כפתורים אלו, במשך 5 שניות, עד שנורת הLED מבהבת באור אדום פעם אחת.



על מנת לשחרר את הנעילה, יש לחזור על הפעולה עד שנורת הLED מבהבת באור ירוק פעם אחת.




בדיקת מצב הסוללה

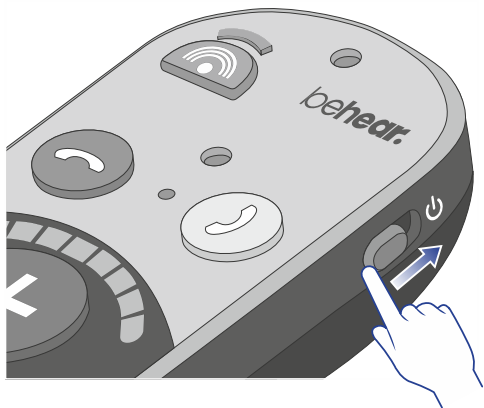


הזיזו את כפתור ההפעלה
כלפי מעלה לזמן קצר
ושימו לב לצבע של נורת
הלד:




טוב
>50%

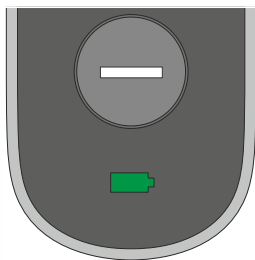


בינוני
>10%

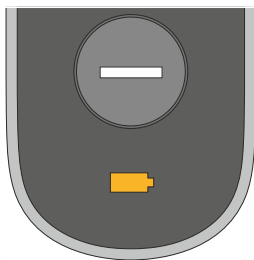

חלש
<10%

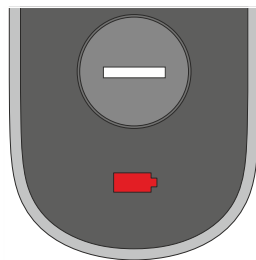

טעינה עם העריסה

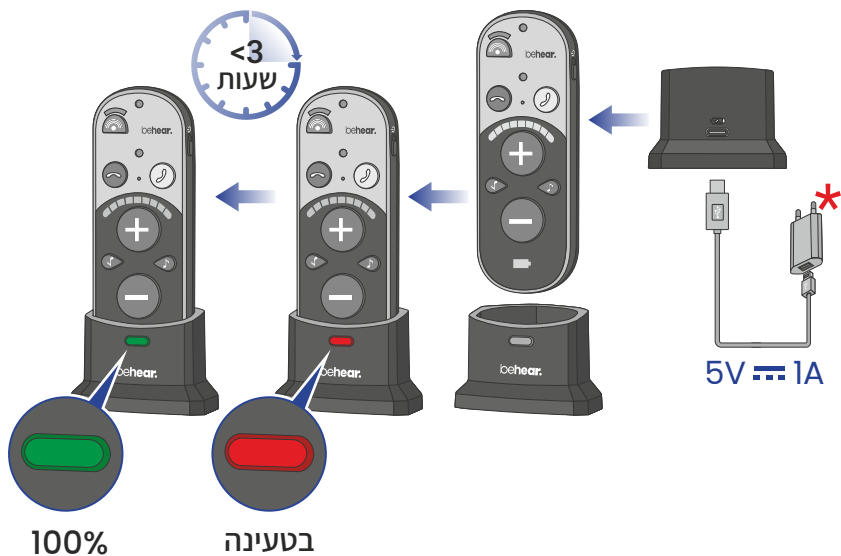

טעינה ללא העריסה



שקע לקיר אינו כלול *


חיבור לטלפון חכם



הזיזו את כפתור ההפעלה
כלפי מעלה והחזיקו אותו עד
שמנורת הled מבהבת
באדום וכחול.




ביחור ב-BeHear SMARTO מרשימת
מכשירי הבלוטות' הזמינים (במכשיר
הטלפון החכם).

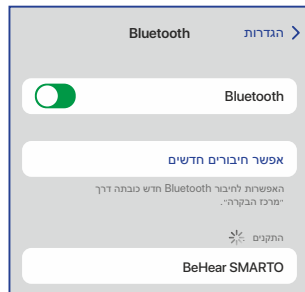


כאשר המגבר מחובר, נורת הled תהבהב
בצבע כחול.

ניהול שיחות טלפון

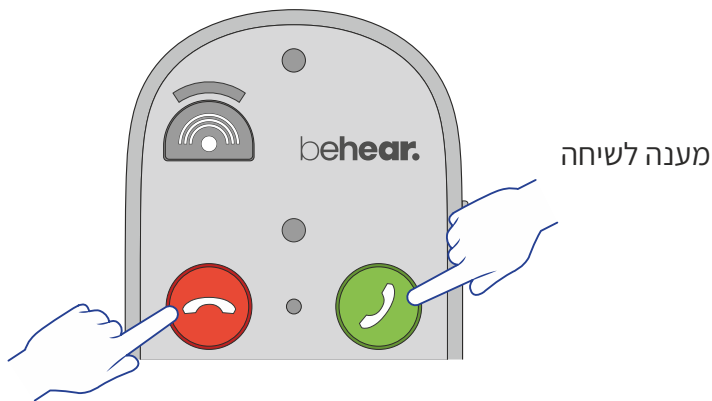

דחיית/סיום שיחה

האזנה למוזיקה/אודיו

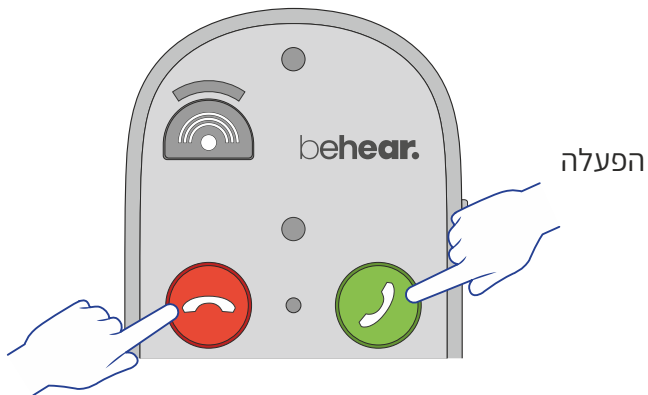


השהייה

שיחה למספר חירום

1

הגדירו באמצעות
האפליקציה מספר
לשיחת חירום.

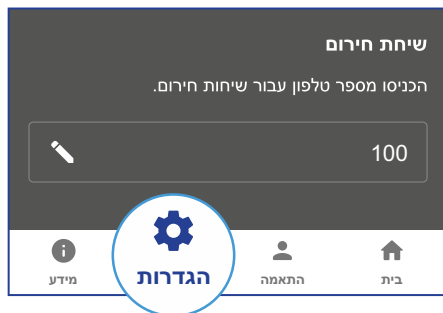

על מנת לחייג מספר זה יש ללחוץ
על הכפתור  במשך שתי שניות,
עד שנורת הled מהבהבת באדום.



נדרש חיבור בלוטות'



תכונות מיוחדות באפליקציית BeHear

התאמה אישית – בצעו הערכת שמיעה על מנת להתאים את ההגבר למצב השמיעה שלכם.

מיסוך טנטון – כווננו את צליל המיסוך כדי להקל על תופעת טינטון. ראו חלק **ט** לפרטים נוספים.

האטת קצב דיבור – הפעילו מצב EasyListen לשיפור מובנות דיבור בשיחות בטלפון הנייד.

כיוון קול – הנמיכו רעשי רקע, חלוקת צליל בין אוזן ימין לשמאל, נקודת שמע מיטבית ועוד.

עדכונים – בצעו עדכוני גירסא למגבר.

נעילה/שחרור כפתורים – מנעו לחיצות ושינויים לא רצויים, לפונקציות ספציפיות.

התאמה אישית

n


התאימו את ההגבר למצב השמיעה שלכם.



1. הרכיבו את האוזניות שברצונכם להתאים.

2. באפליקציה בחרו התאמה << הערכה.





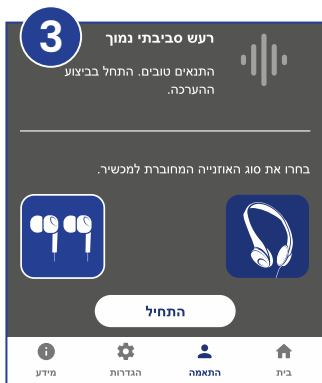

3. הרכיבו את האוזניות שברצונכם להתאים.

4. עקבו אחר ההוראות לביצוע הערכת השמיעה. (יש ללחוץ "שמור" למעבר מתדר לתדר)

5. ליחצו "שמירה והחלה".

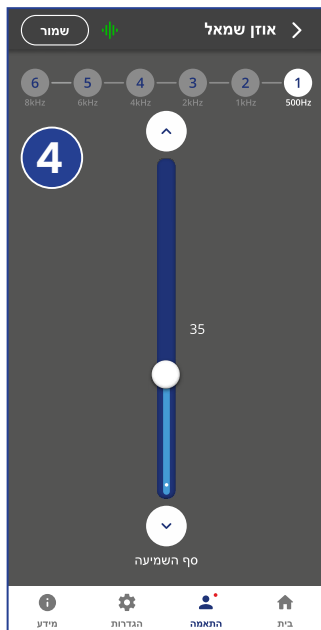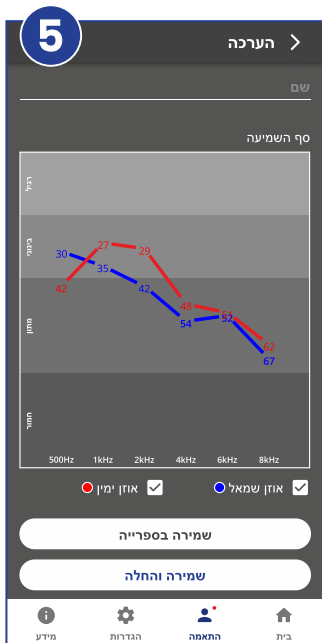

מיסוך טינטון


מיסוך טנטון באמצעות רעש נועד להקל על תופעות של טינטון. יש להפעיל את המיסוך כאשר המגבר במצב שמיעה.

ניתן לשנות את עוצמת הטון, התדר והחזרה של המיסוך, ואת החלוקה בין אוזן ימין לשמאל, באמצעות אפליקציית BeHear.



ערכו פרמטרים אלו באמצעות לחיצה על סימן במסך הבית של האפליקציה.

למידע על הורדת האפליקציה אנא פנו לחלק במדריך הזה.

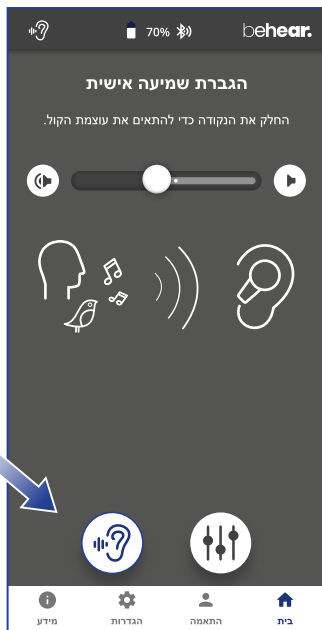

טיפול בתקלות



אין צלילים

ודאו שהאוזניות מחוברות כהלכה

ודאו שהמכשיר מופעל

כוונו את עוצמת הקול

האוזניות אינן נוחות

נסו להחליף את מתאמי הסיליקון

לא ניתן לשמוע שיחות
טלפון / מוזיקה

ודאו חיבור בלוטות'

חיבור הבלוטות' מתנתק
לעיתים קרובות

ודאו שהינכם במרחק של עד 10
מטרים מהמכשיר המשדר

הפרעות בשמיעה

השתיקו צלצולים מהטלפון החכם
(התראות, כפתורי לחצנים וכו')

התנהגות לא צפויה

אתחלו את המגבר על ידי חיבור
למטען.

תמיכה



סרטוני הדרכה:

<https://bit.ly/smarto-video>

טלפון לתמיכה:

077-3204102



support@alango-behear.com



www.alango-behear.com