

**PHONAK**  
life is on

A Sonova brand

# PerfectDry Lux.

## User manual

نشرة إعلام المستعمل

Instrucciones de uso

Mode d'emploi

מדריך למשתמש

取扱説明書

사용자설명서

Manual de instruções

Инструкция по применению

Kullanım Kılavuzu

Hướng dẫn sử dụng

使用手冊




HE

**1** לחבר את PerfectDry Lux הנורית הכחולה תדלקת כדי לציין שהמכשיר מופעל. אם לא מתרחשת שום פעולה במשך 30 שניות, הנורית תתכבה.

**2** להקפיד להפעיל את המחזור כשמכסה סגור. כמו כן, אין לפתוח את המכסה במהלך הפעולה, אחרת ה-PerfectDry Lux יתכבה.

ה-PerfectDry Lux מתאים לכל סוגי מכשירי השמיעה (כולל נטענים).

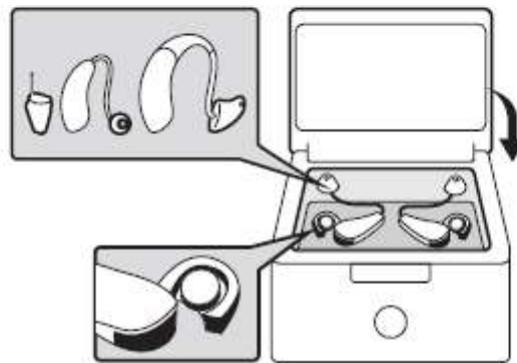

מומלץ לנקות את מכשירי השמיעה לפני ניקוי הלחות. יש לפתוח את תאי הסוללות של מכשירי השמיעה שלך (ניתן להשאיר את הסוללות במכשירי השמיעה במהלך המחזור).

I

**3** ללחוץ על כפתור המגע כדי להתחיל את המחזור. האור הכחול יבהב לאט. ה-PerfectDry Lux יפסיק אוטומטית לאחר 45 דקות.



**המשמעות אותות האור**

**כחול מהבהב** < פועל

**כחול קבוע** < המתנה

## פירוט הפונקציות

UV-C 360°

ל-PerfectDry Lux מנורת UV-C קצרה באורך גל כאשר הסידור הטבעתי שלה ב-360° מאפשר להגיע לכל המשטחים של מכשיר השמיעה. התחזוקה מתקבלת על ידי שילוב של הסרת לחות עם אוויר חם כפוי על ידי מאוורר ו-UV-C 360°. המנורה תדלקת בחמש הדקות הראשונות של מחזור התחזוקה ולאחר מכן תתכבה אוטומטית.

### ייבוש

ל-PerfectDry Lux יש מערכת פטנט להסרת לחות באוויר חם. כתוצאה מכך, הכוח והזמן הנדרשים להסרת הלחות מצטמצמים. הטמפרטורה של תא השירות נשלטת אלקטרונית כדי להשיג טמפרטורה מתחת ל-35°C / 95°F / ללא קשר לטמפרטורת הסביבה כדי למנוע נזק למכשירי השמיעה המטופלים. **על מנת לשמר את האיכות האופטימלית של מכשירי השמיעה שלכם, מומלץ בחום שימוש יומיומי ב-PerfectDry Lux.**

## הוראות בטיחות

אין להשאיר בהישג ידם של ילדים. כל פעולה, מלבד ניקיון ותחזוקה רגילה על ידי הלקוח, חייבת להתבצע על ידי שירות לקוחות של היצרן או על ידי איש מקצוע מאושר. אין להכניס את ה-PerfectDry Lux, את כבל החשמל או את התקע למים או לכל נוזל אחר. אם כבל החשמל או התקע פגומים, אין לתשתמש במכשיר והחלף אותם מיד. יש להחליף את מתאם החשמל שלך בדגם קוקורי. להניח את PerfectDry Lux על משטח שטוח, יבש ויציב. אין להסתכל ישירות במנורת UV-C הנמצאת בתא הסרת הלחות. כדי לנתק, יש לאחוז בתקע, לא בכבל. לעולם אין להשתמש בחומרי ניקוי או במוצרים קורוזיביים כדי לנקות על PerfectDry Lux שלך. אי מילוי הוראות אלה מבטל את האחריות. היצרן אינו יכול לשאת באחריות לנזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון או מטיפול לא נכון.

## הנחיות תחזוקה

לנקות עם מטלית רכה. אין להשתמש במוצרים שוחקים כדי לנקות את PerfectDry Lux. אין לרסס נוזל לתוך המכשיר. יש לשמור את PerfectDry Lux סגור כאשר אינו בשימוש כדי למנוע משקעים של זיהומים.

## תקינה בנושא רפואיים

הנחיה UE/2014/30 לגבי ההרמוניזציה של החוקים של המדינות החברות לגבי תאימות אלקטרומגנטית • הנחיה UE/2014/35 לגבי ההרמוניזציה של החוקים של המדינות השותפות לגבי השימוש במגבלות מתח מסוימות • הנחיה UE/2011/655 לגבי הגבלת השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בצידוד חשמלי ואלקטרוני (RoHS) • הנחיה UE/2012/19 בנוגע לפסולת בעקבות צידוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE) • תקנה EC/1907/2006 בנוגע לרישום, בדיקה, אישור והגבלה של חומרים כימיים (REACH) Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

## אחריות

36 חודשים - (כולל כבל ושנאי). במקרה של תקלה, פנה למכון השמיעה שלך. הוכחת רכישה תידרש עבור כל פעולה של שירות לאחר המכירה במהלך תקופת האחריות. אחריות זו לא תחול במקרה של כשל שנגרם כתוצאה מתאונה או אירוע או נזק דומה, החדרת נוזלים, רשלנות, שימוש לא נכון, כל פירוק, ליקוי בתחזוקה או כל נסיבות אחרות מצד המשתמש. בנוסף, אחריות זו לא תחול במקרה של כשל שנגרם על ידי ברק או כל שינוי אחר במתח החשמלי. כאמצעי זהירות, אנו ממליצים לנתק את PerfectDry Lux מהחשמל במקרה של סערה.

## מידע על הסמלים

משמעות הקיצורים והסמלים:

 עיין במדריך/ חוברת ההנחיות	
 יצרן	 תארך הייצור
 מספר סדרתי	5V=0.4A זרם ישר
 קטלוג אסמכמאות	 שימוש בבית
 מספר אצווה	 התאמה לתקינה אירופאית
 המוצר מיוצר ב-ABS עם קוד מיתווך 7	 הנחיות לגבי מיון פסולת
 חיסול - חיסול מכשירים ישנים תוך שמירה על הסביבה. המסשירים הישנים מכילים חומרים הניתנים למחזור, אותם יש למחזר. לך חשוב להשליך את המסשירים הישנים באמצעות המערכות המתאימות של מיון ואיסוף פסולת	

## נתונים טכניים

### מאפיינים

זמן מחזור: 45 דקות.  
טמפרטורת סביבה הפעלה:  
12 מעלות צלזיוס עד 40 מעלות צלזיוס  
ספק כוח:  
קלט: 50/60 Hz / 100-240 Vac  
Output: 5 Vdc  
חיבור: כבל USB - מיקרו USB

פנימי (b) (xhxd): 70 x 21 x 51 מ"מ  
חיצוני (bxhxd): 93 x 48 x 76 מ"מ  
משקל (גרם): 144 גרם  
מנורת UV: 253.7 ננומטר  
הספק מקסימלי: 4W  
הספק המתנה: 0.04 וואט  
תנאי אחסון מ-20°C עד +65°C  
טמפרטורת ייבוש: 35°C / 95°F



אנו שומרים על הסביבה - מנתקים את מכשיר PerfectDry Lux מהחשמל, כשמכשירי השמיעה כבר נקיים!